

Der Trocken-Max Pferdefön



Was ist Trocken-Max ?

Der **TROCKEN-MAX** ist ein wirkungsvolles Hilfsmittel, das gerade die Profi-Fachwelt, mit ständig einsatzbereiten und gesund zu erhaltenden Pferden, überzeugte. Der **TROCKEN-MAX** ermöglicht schweißtreibendes Wintertraining und verhindert Erkältungen und Nierenkoliken. Er ist tierärztlich getestet und für sehr fortschrittlich befunden und findet erfolgreiche Anwendungen im Bereich: Military, Springen, Western, Dressur, Renn- und Fahrsport sowie in Pferdekliniken mit besten Referenzen!



Der **TROCKEN-MAX** besteht aus einer zweiwandigen, extrem leichten Decke aus Fallschirmseide für das Pferd, die auf der Innenseite kleine, regelmäßig angeordnete Löcher besitzt, und einem Warmluftgebläse mit einem Verbindungsschlauch. Die Luft, nur um wenige Grade wärmer als die Körpertemperatur, bläst die leichte Decke auf und bildet gleichzeitig einen Luftraum zwischen Pferd und Decke. Durch die gleichmäßig verteilten Luftaustrittsöffnungen gelangen die Luftströme an alle Körperteile und trocknen diese sehr schnell.

Wie funktioniert der Trocken-Max ?

Der **TROCKEN-MAX** trocknet Ihr Pferd mit einem schwebenden Warmluftumhang, schonend und gleichmäßig an allen wichtigen Körperpartien, und das in rund 15 Minuten!

AmpliMed® synchro -
Modulierte Mittelfrequenz Elektrotherapie (MET)
Speziell für die Tiermedizin entwickelt
Testgeräte bei uns erhältlich

Kim Ranch
Rembserhof • 56237 Alsbach/Westerwald
Tel.: (02623)9276910 • Fax: (02623)9293563
Internet: [http:// www.kimranch.de](http://www.kimranch.de)
e-Mail: schmidmi@yahoo.de

Der Trocken-Max Pferdefön



Das Herz des **TROCKEN-MAX** ist ein geräuscharmes Gebläse. Hier werden die Warmluftströme erzeugt, die durch einen 300 cm langen, trittfesten Schlauch zum Bauchteil der Trockendecke geblasen werden. Die Decke ist konstruiert wie eine Trockenschwebhaube. Sie besteht aus einem speziell strapazierfähigen und leichten Material. Die warme Luft strömt gleichmäßig entlang der Bauch-, Brust- und Rückenpartien. Durch den Druck schwebt die Decke leicht über dem Pferdekörper und passt sich so automatisch an den Proportionen an.

Wie verwendet man den Trocken-Max ?

TROCKEN-MAX übertrifft alle herkömmlichen Trocknungsmethoden!

Die einfache und unkomplizierte Handhabung:

Decke auffalten und dem Pferd mit den Klettverschlüssen nach außen, locker auflegen.

Den Luftabzweiger am Schlauchende mit den Lufteinlaßkanälen am Bauchteil der Decke verbinden.

Das Gebläse einschalten und kurz abwarten bis sich die Decke durch den Luftdruck dem jeweiligen Pferdekörper anpasst.

Jetzt die Klettverschlüsse an Bauch und Brust locker verschließen.

Nach rund 15 Minuten, je nach Fell, ist das Pferd trocken.

Übrigens: Auch nervöse Pferde sind schnell an die angenehme Trocknung zu gewöhnen.

AmpliMed® synchro -
Modulierte Mittelfrequenz Elektrotherapie (MET)
Speziell für die Tiermedizin entwickelt
Testgeräte bei uns erhältlich

Kim Ranch
Rembserhof • 56237 Alsbach/Westerwald
Tel.: (02623)9276910 • Fax: (02623)9293563
Internet: [http:// www.kimranch.de](http://www.kimranch.de)
e-Mail: schmidmi@yahoo.de

Der Trocken-Max Pferdefön



Bestellformular ausdrucken und per Fax an (+49)(0)2623/9293563

Bitte alle Felder ausfüllen!

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Postleitzahl: _____
Ort: _____
Land: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

In welcher Grösse **TROCKEN-MAX Gr. I** 178 – 185 cm in olivgrün
benötigen Sie den **TROCKEN-MAX Gr. II** 145 – 177 cm in olivgrün
TROCKEN-MAX? **TROCKEN-MAX Gr. III** 120 – 144 cm in olivgrün
 TROCKEN-MAX Western 145 – 155 cm in olivgrün

Zum Preis von 799.- € inkl 19 % MWSt. per Überweisung im voraus (zuzüglich Versand).

mit Ihrem Logoaufdruck **Aufpreispflichtig**
mit ihrem Farbwunsch _____ **Aufpreispflichtig**
die Decke in weiß mit graphiti **Aufpreispflichtig**

Sie bekommen von uns eine Bestätigung Ihrer Bestellung und unsere Kontoverbindungsdaten per Post/eMail zugestellt.

Wollen Sie Infomaterial zu unserem medilogic Satteldrucksystem
Wollen Sie Infomaterial zu unserem Amplimed Elektrotherapie
Wollen Sie Infomaterial zu unserem DSL via Satellit

AmpliMed® synchro -
Modulierte Mittelfrequenz Elektrotherapie (MET)
Speziell für die Tiermedizin entwickelt
Testgeräte bei uns erhältlich

Kim Ranch
Rembserhof • 56237 Alsbach/Westerwald
Tel.: (02623)9276910 • Fax: (02623)9293563
Internet: [http:// www.kimranch.de](http://www.kimranch.de)
e-Mail: schmidmi@yahoo.de